

FICHA DE DATOS

FFP2-NR Plegable con Válvula
Mascarilla Protectora Desechable

7B - JANE



DETALLES DEL PRODUCTO

LíneaProtección Respiratoria
FFP2 NR**Rango**Purificador de aire desechable
Mascarilla (APR)**Tipo de Producto**

Mascarilla Plegable con Válvula

Estilo de la prenda

Cinta de cabeza

Marca

VCare.Earth

Composición del Material

Tejido no tejido(66.7%), Tela fundida por soplada (33.3%)

CERTIFICADOS

Organismo Notificador 0370

Categoría EPI 3

Cumple la Directiva EN 149:2001+A1+2009

Otras Certificaciones CNAS

Seguro de Calidad ISO 9001

[VER CERTIFICADOS](#)

USO DEL PRODUCTO

Sanitario, Prevención de Pandemia, textil, minería, construcción, industrias de hierro y acero, industria de automoción, carpintería (excepto roble, haya y maderas exóticas), actividades agrícolas y hortícolas, corte y moldeo de metales, y otros. Protege contra polvos, nieblas y humos que contengan carbonato de calcio, arcilla, caolín, celulosa, algodón, harina, metales ferrosos, cemento, silicato de sodio, azufre, fibras de vidrio y plástico, madera dura, carbón, cuarzo, metales no ferrosos, cobre, aluminio, bario, titanio, vanadio, cromo, manganeso, molibdeno, aceites vegetales y minerales, fluidos para el trabajo de metales (esta lista no es exhaustiva)

[VER PRODUCTO ONLINE](#)

FFP2-NR Plegable con Válvula Mascarilla Protectora Desechable

7B - JANE



APLICACIÓN DE LA MASCARILLA

Prevención de la Pandemia (COVID19), Agricultura, Manipulación de piezas de automoción, Construcción de edificios, Fundición, Industrias de hierro y acero, Minas y Canteras, Industrias Textiles, Industrias de Madera.

NIVEL MÁXIMO DE USO

Pueden utilizarse en atmósferas que contienen aerosoles sólidos y/o líquidos en concentraciones de hasta 12 (10 en el Reino Unido, FIN,D,I,S) x LEL* clase FFP2 (toxicidad media). "NR" (No reutilizable) marcada, puede ser utilizada una sola vez (según a EN 149:2001+A1:2009). En el caso de contaminantes específicos pueden aplicarse ciertas restricciones o limitaciones. Por favor, consulte las normas de seguridad y salud.

CARACTERÍSTICAS

- Protege contra niveles moderados de polvo
- Protege contra aerosoles sólidos y líquidos
- Aplicable para enyesado y lijado
- Mascarilla ultra ligera
- Protección de filtrado multi capa

Para identificar instintivamente los niveles de protección, la mascarilla dispone de un clip nasal previamente formado para ajustársela perfectamente. Las mascarillas disponen de un gran volumen interno para facilitar la comunicación y la respiración. Cinta ultra flexible y resistente. Mascarilla ultra ligera para reducir la fatiga del usuario. No contiene látex, silicona ni PVC.

BENEFICIOS

Protección y adaptación garantizadas para el usuario durante periodos de uso prolongado. Ofrecen seguridad adicional. Niveles de confort excepcionales. Capa interior de polipropileno suave, soldadura ultrasónica que reduce las gotas de fibra y aumenta la comodidad de uso. No es necesario cambiar la mascarilla durante el período normal de uso. Previene irritaciones. Sin riesgo ante alergias al látex. Respetuosa con el medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Abra la mascarilla de filtrado de partículas, de cara al interior de la mascarilla, y sostenga la mascarilla en cada mano para que el clip de la nariz quede en la parte superior.
2. Saque el clip de sujeción del paquete y coloque un extremo del clip de sujeción a uno de los cordeles de la mascarilla.
3. Mantenga la mascarilla de filtrado de partículas en posición sobre la nariz y la boca, y sujete el otro extremo del clip de retención al otro cordel de la mascarilla.
4. Ajuste a una posición cómoda y asegúrese de que la mascarilla se adapta a la cara.
5. Doble el clip de la nariz para conseguir un cierre hermético alrededor de la nariz.
6. Comprobación del ajuste:
 - a.) Para probar el ajuste de la mascarilla de filtrado de partículas, coloque ambas manos sobre la mascarilla de filtrado de partículas e inhale fuertemente. Si siente flujo de aire en el área de la nariz, reajuste / apriete el clip de la nariz.
 - b.) Si siente flujos alrededor de los bordes de la mascarilla de filtrado de partículas, vuelva a colocar el cordel de la mascarilla para lograr un mejor ajuste.
7. Cambie la mascarilla de filtrado de partículas inmediatamente si la respiración se vuelve difícil o la mascarilla de filtrado de partículas se daña o deforma.
8. Cambie la mascarilla de filtrado de partículas si no se puede lograr una hermeticidad adecuada.
9. El cumplimiento cuidadoso de estas instrucciones es muy importante para el uso seguro de la mascarilla de filtrado de partículas.

FFP2-NR Plegable con Válvula Mascarilla Protectora Desechable



7B - JANE

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

1. No debe usarse en atmósferas que contengan menos del 19.5 por ciento de oxígeno.
2. No exceda las concentraciones máximas de uso establecidas según el Reglamento (UE) 2016/425.
3. Utilice y conserve este producto de manera adecuada.
4. Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes.
5. No se recomienda su uso en pacientes con disnea o cardiopatía congénita.
6. Evite altas temperaturas superiores a 50°C o alta humedad.
7. Esta mascarilla de filtrado de partículas marcada "NR", no se utilizará durante más de un turno de trabajo.
8. Es poco probable que se logre la hermeticidad si la mascarilla se usa con barba.

DURACIÓN

2 años

EMBALAJE

Tamaño

Bolsita: 14.3 x 17.5 cm
Caja Intermedia: 34 x 29.2 x 17.5 cm
Caja Principal: 70 x 60 x 54.5 cm

Contenido

1 mascarillas por Bolsita
50 Bolsitas por Caja Intermedia
600 mascarillas por Caja Principal



[VER EMBALAJES](#) >

**El empaquetado puede variar con diferentes cantidades empacadas.*

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Antes de utilizarlas, guarde las mascarillas en su paquete original lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y químicos dañinos.

La temperatura de almacenamiento recomendada es de entre -20°C a + 40°C y humedad relativa de 20 a 85%. Utilice el embalaje original proporcionado para transportar el producto.

LIMITACIONES DEL TIEMPO DE USO

Si la mascarilla se encuentra dañada, manchada o la respiración se vuelve dificultosa, abandone el área contaminada de inmediato y reemplace la mascarilla por una nueva.

VCare.Earth no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que VCare.Earth no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de VCare.Earth, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

[CONSULTAR SOBRE ESTE PRODUCTO](#) >